

Les dispositifs Igloo® incluent un pack de gel qui s'applique sur les zones douloureuses. C'est une innovation dont le principe thérapeutique est basé sur l'action conjuguée de la cryothérapie, de la compression et de la contention. Cette technique soulage rapidement la douleur en limitant l'œdème, l'inflammation et en évitant les hématomes, ce qui facilite ensuite la rééducation et la récupération.


COMPOSITION DU SET



sac de congélation



pack de gel

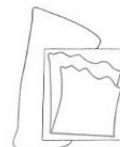

jersey de protection plié et sous sachet



chausson de cryothérapie avec pompe et tubulure




attelle articulée

PRINCIPE DE MISE EN PLACE




1/ Placer le pack de gel bleu (sans l'attelle ni la pompe), dans le sac de congélation, pendant environ 2 heures au congélateur. À la sortie du congélateur, le pack doit être souple (sinon, laisser le pack à température ambiante le temps qu'il s'assouplisse).

selon votre congélateur

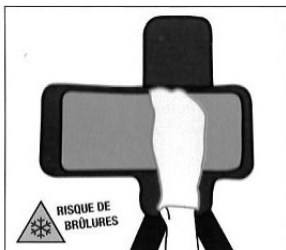


2/ Ouvrir entièrement le chausson en croix et positionner le pack de gel à l'intérieur du chausson. Le pack de gel ne doit pas être en contact direct avec la peau. Enfiler le jersey de protection puis placer le pied au centre du chausson.

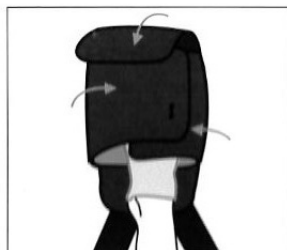

3/ Refermer les trois pans de la croix en commençant par le pan latéral droit puis le gauche. Rabattre ensuite le pan de devant.



4/ Amener les deux bandes élastiques sur le dessus du pied en les croisant et les fixer à l'aide de l'auto-agrippant.

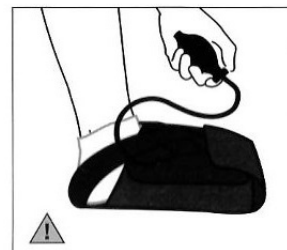



5/ Visser la pompe sur l'attelle, positionner le bouton sur ON et exercer 5 à 10 pressions. Stopper quand la pression est suffisante et confortable. Fermer le robinet sur la position OFF et débrancher la pompe de gonflage.

⚠ La compression ne doit pas être excessive et doit rester confortable. En cas de sensation de fourmillement, dégonfler légèrement l'attelle à l'aide du petit bouton situé sous la pompe, robinet en position ON.

THÉRAPIE PRÉVENTIVE DE L'HALLUX VALGUS

L'attelle articulée HV s'utilise en cas de déviation légère et moyenne du gros orteil appelée aussi Hallux Valgus :

- Effet correcteur sur l'articulation du gros orteil.
- Portée la nuit, l'orthèse permet de limiter la déviation du gros orteil.
- Diminue le risque d'arthrose.

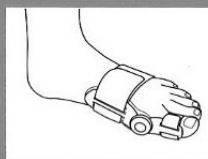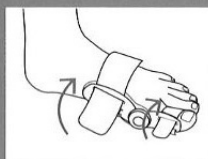

Placer l'articulation de l'attelle sur la partie proéminente (ou oignon), et sangler le pied avec la bande auto-agrippante puis l'orteil.

La durée de la séance est fonction des instructions du praticien. Préconisée pour 20 min, 3 à 4 fois par jour. **⚠** Utilisation en continu déconseillée. Après utilisation, dégonfler l'attelle (position du robinet sur ON).

AVERTISSEMENT

CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE UTILISÉ SUIVANT LES INSTRUCTIONS D'UN PRATICIEN DÛMENT HABILITÉ (CHIRURGIEN, MÉDECIN, KINÉSITHÉRAPEUTE, PHARMACIEN...).
Risque de brûlures sur peau hypersensible

CONTRE-INDICATIONS

(avis médical obligatoire avant utilisation)

- Troubles de la sensibilité cutanée
- Insensibilité au froid
- Allergie au froid
- Syndrome de Raynaud
- Cryoglobulinémie
- Artérite
- Polyarthrite
- Diabète

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le pack de gel ne doit pas être mis en contact direct avec la peau.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas percer la tubulure, le pack de gel ou l'attelle.
- Ne pas chauffer le pack de gel.
- Ne pas ingérer le gel.
- En cas de contact direct du gel avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
- Ne peut être utilisé en cas de dégradation.
- En cas de doute sur l'utilisation du dispositif, contacter un professionnel de santé.

Les dispositifs IGLOO® ne requièrent pas de conditions particulières de stockage, de manutention et d'élimination.



Laver régulièrement le dispositif médical.
Laver à la main, à l'eau tiède, avec un savon doux. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de détergent.
Ne pas immerger l'attelle.



Ne pas laver ni sécher en machine.



Faire sécher suspendu.
Ne pas sécher près d'une source de chaleur.



Ne pas repasser.



Conforme aux exigences de l'Union Européenne.



Fabricant.



Mise au rebut en déchetterie.



Référence.



Numéro de lot.



Code LPP.



Date limite d'utilisation.



Usage multiple pour un seul patient.



Mise en garde.

DESIGNATION

ATTELLE DE CRYOTHERAPIE COMPRESSIVE IGLOO® SET HALLUX VALGUS

REFERENCE	DESIGNATION COMMERCIALE	EAN
IGHV	IGLOO SET HALLUX VALGUS	3615570000168

INDICATIONS

Ce set est composé de 2 dispositifs médicaux distincts ne pouvant pas être utilisés en même temps par un patient, mais en association suivant les recommandations d'un professionnel de la santé.

SET = ATTELLE ARTICULEE + ATTELLE DE CRYOTHERAPIE COMPRESSIVE IGLOO® chausson de cryothérapie

ATTELLE DE CRYOTHERAPIE COMPRESSIVE IGLOO® chausson de cryothérapie

Le chausson de cryothérapie Hallux Valgus IGLOO® permet de maintenir le froid sous pression afin de soulager la douleur ainsi que de limiter l'inflammation et la formation d'œdèmes pour faciliter la rééducation. Elle peut aussi être indiquée dans les cas suivants :

- Traumatologie (entorses, tendinite, déchirures, contracture musculaire, blessures sportives...)
- Utilisation postopératoire Hallux Valgus et autres chirurgies de l'avant pied
- Rhumatismes inflammatoires
- Rééducation.

ATTELLE ARTICULEE


L'attelle articulée HV s'utilise en cas de déviation légère et moyenne du gros orteil appelée aussi Hallux Valgus.

Diminue le risque d'arthrose :

- Effet correcteur sur l'articulation du gros orteil.
- Portée la nuit, l'orthèse permet de limiter la déviation du gros orteil.
- Diminue le risque d'arthrose.

COMPOSITION

- Notice d'utilisation

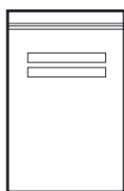

sac de
congélation




pack de gel



jersey de protection plié
et sous sachet



chausson de cryothérapie
avec pompe et tubulure

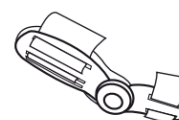

attelle articulée

DESCRIPTION

Les attelles IGLOO incluent un pack de gel qui s'applique sur les zones douloureuses. C'est une innovation dont le principe thérapeutique est basé sur l'action conjuguée de la cryothérapie, de la compression et de la contention. Cette technique soulage rapidement la douleur en limitant l'œdème, l'inflammation, et en évitant les hématomes, ce qui facilite ensuite la rééducation et la récupération.

PRINCIPE D'UTILISATION

L'utilisation est simple, efficace et confortable. Pour éviter tout risque de brûlure, il est indispensable d'interposer un tissu entre le pack de gel et la peau. Nos attelles sont ajustables, grâce à un système de fermeture par bande auto-agrippante. Une pompe permet de régler la pression de l'air. Il est indispensable, à chaque changement de pack de gel, de dégonfler l'attelle et de la repositionner avec les bandes auto-agrippantes avant de la gonfler de nouveau.

<u>CONDITIONNEMENT</u> Unitaire : en sachet	<u>USAGE UNIQUE</u> Non	<u>USAGE INDIVIDUEL</u> Oui
<u>STERILISATION</u> Non applicable	<u>DATE DE PEREMPTION</u> La durée de vie du gel est de 6 ans	<u>CONDITIONS DE STOCKAGE</u> Non

NETTOYAGE / CONDITIONNEMENT

- Laver régulièrement le dispositif médical
- Laver à la main, à l'eau tiède, avec un savon doux
- Ne pas utiliser d'eau de Javel ou de détergent
- Ne pas immerger l'attelle
- Ne pas laver ni sécher en machine
- Faire sécher suspendu
- Ne pas sécher près d'une source de chaleur
- Ne pas repasser

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Après avoir été placé dans le sac de congélation, le pack de gel doit être mis au congélateur environ deux heures avant l'utilisation. À la sortie du congélateur, le pack doit être souple (sinon, laissez le pack à température ambiante le temps qu'il s'assouplisse).
- Disposez le pack de gel dans l'attelle, puis mettez en place l'attelle en suivant le principe de mise en place (voir ci-dessous). En aucun cas le pack de gel ne doit être en contact direct avec la peau. Interposez un jersey (fourni avec certains modèles) entre le pack de gel et la peau, puis positionnez l'attelle par-dessus celui-ci.
- L'application de l'attelle avec le pack de gel est préconisée durant 20 à 30 minutes maximum (temps d'efficacité de la thérapie par le froid), et trois à quatre fois par jour. L'utilisation continue de la cryothérapie est déconseillée.
- Utilisation de la pompe à main :
 - Le robinet situé sur l'attelle doit être en position ON.
 - La compression ne doit pas être excessive et doit rester confortable.
 - Si une compression trop importante ou une perte de sensibilité (fourmillements) est ressentie, dégonflez légèrement l'attelle à l'aide du petit bouton situé sur la pompe, le robinet restant en position ON.
 - Une fois la compression satisfaisante obtenue, verrouillez le robinet sur la position OFF et débranchez la pompe de gonflage.
- L'attelle peut être lavée en respectant les conseils ci-dessous.
- En cas de contact direct du gel avec la peau, rincez abondamment à l'eau.

CONTRE-INDICATIONS (avis médical obligatoire avant utilisation)

- Troubles de la sensibilité cutanée
- Insensibilité au froid
- Allergie au froid
- Syndrome de Raynaud
- Cryoglobulinémie
- Artérite
- Polyarthrite
- Diabète

Ne pas placer en contact avec une peau lésée

PICTOGRAMMES

 Dispositif médical	 IUD
 Fabricant	 Consulter les instructions d'utilisation
 Référence catalogue	 Date limite d'utilisation
 Marquage CE	 Un seul patient, plusieurs utilisations
 Numéro de lot	 Mise au rebut en déchetterie.

CLASSEMENT CE

Classe I suivant le règlement 2017/745 des dispositifs médicaux (règle 1)

LPP : 7160787

Fabricant : Implants Service Orthopédie – 18 avenue du Polygone – 42300 ROANNE (France)

